

# Support de lecture pour ORCAM READ



## SUPPORT DE LECTURE POUR ORCAM READ

Cet accessoire est parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs souffrants de difficultés de préhension ou souhaitant simplement lire assis devant un bureau. L'Orcam Read posé en haut du support, offre également la possibilité de capturer une image complète d'une page A4.

- Permet la lecture des textes par un simple pointé du doigt du texte désiré sur le document
- Support léger et discret transformant l'Orcam en machine à lire vocale de bureau
- Facilite la lecture de documents A4 et A3
- Comprend un mini haut parleur à brancher directement sur l'ORCAM



Le support de lecture pour [Orcam Read](#), ajoute la fonctionnalité très recherchée, de machine à lire posée.

Bien entendu, à tout moment, l'Orcam Read peut être retiré du support et être utilisé tenu à la main.

**Une facilité de prise en main**



**[Vidéos et produits Basse Vision](#)**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Support de lecture pour ORCAM READ

Une fois le support de lecture pour Orcam assemblé et posé sur une table ou un bureau, le document à lire est mis entre les pieds du support.

L'Orcam inséré dans le haut du support, est orienté à la verticale vers le document. Il est alors prêt à commencer la lecture vocale du texte, à la demande de l'utilisateur, soit par un geste, soit par la voix.

## La lecture par un simple geste de la main

Pour commencer une lecture d'un paragraphe d'une revue, ou d'une page d'un livre, il suffit de pointer avec un doigt, le milieu de ce même paragraphe. L'Orcam émet alors un petit son et attend que le doigt se retire, pour prendre la photo du texte et commencer la lecture vocale immédiatement.

L'arrêt de la lecture a lieu lorsque la main est placée au dessus du document, doigts légèrement écartés.

## La lecture de page A4 en entier

La lecture d'une page entière se lance grâce à une commande vocale. il suffit de parler distinctement et dire "Orcam lit tout". Ainsi Orcam prend en photo tout le document et commence la lecture en partant du coin haut gauche.

La main légèrement ouverte placée au dessus du document, arrête alors la lecture.

## Le support de lecture pour Orcam, une vraie machine à lire

Le support de lecture transforme ainsi la caméra miniature de lecture ORCAM, ultra transportable, en une machine à lire de bureau excessivement simple et puissante.

Cette machine à lire convient alors à toutes les personnes malvoyantes ou dyslexiques qui souhaitent une lecture vocale efficace, rapide tout en gardant les mains libres.

**note** : cette fonctionnalité est possible sur tout Orcam livré après Sept 2023. Pour les Orcam plus anciens, une mise à jour est possible.

## Un son plus clair avec le mini HP

Un petit haut parleur est livré avec le pieds ORCAM. Il se connecte directement dans la prise pour les écouteurs situé à l'arrière du stylo caméra ORCAM.

Le son ainsi amplifié est plus audible et agréable pour tous les utilisateurs souffrant d'une baisse de l'acuité auditive.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Support de lecture pour ORCAM READ

Ce petit haut parleur se recharge via un câble micro USB livré également.



## Support compatible avec les ORCAM Read et My Eye

Dimension en utilisation : Base de 25 cm x 24 cm, Hauteur : 45 cm

Poids : 580 g

note : La fonctionnalité de machine à lire à déclenchement avec un mouvement de doigt est possible sur tout Orcam livré après Sept 2023. Pour les Orcam plus anciens, une mise à jour est possible.

## Mini Haut Parleur

Se connecte directement dans la prise jack 3,5 mm de l'Orcam

Batterie intégrée

- Utilisez Orcam comme une machine à lire de bureau
- Permet la lecture main libre de tout document
- Lecture d'une page entière facilitée
- Support léger, transportable
- L'Orcam Read peut être à tout moment retiré du support pour une utilisation tenue à la main.