

# Téléagrandisseur parlant VEO VOX ( démonstration)




TÉLÉAGRANDISSEUR ET MACHINE À LIRE VOCALE RAPIDE DANS LE MÊME APPAREIL.

**Le VEO Vox est idéal pour lire lettres, journaux, magazines, livres en gros caractères et vocalement à la demande. La reconnaissance de caractère (OCR) est très rapide et permet alors d'augmenter rapidement le confort de lecture.**

- **Grossissement de 1x à 100x** sur écran 24" (61 cm)
- **Eclairage sans reflet** dans l'image
- **Lecture vocale des textes** avec un suivi visuel en temps réel
- Plateau de lecture A3 pour poser votre document et faciliter la lecture
- Menu de personnalisation très complet
- **Télécommande aimanté** positionnée sous l'écran ou à droite du plateau

**Paiement en 3 ou 4 fois possible**

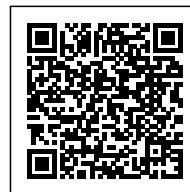

Le téléagrandisseur VEO VOX **combine les avantages d'un vidéo-agrandisseur très performant et d'une machine à lire parlante**. De plus il est remarquable par sa rapidité

# Téléagrandisseur parlant VEO VOX ( démonstration)

de reconnaissance du texte avant la lecture vocale.

## Lire confortablement avec Veo Vox

En premier lieu, la **caméra haute résolution au grossissement de 1X à 100x** et l'**éclairage anti reflet** procurent une image d'excellente qualité quelque soit le grossissement. La consultation de tout type de document est alors très agréable. Ensuite, le VEO VOX comporte un **grand plateau de lecture A3** au mouvement fluide et muni de freins de blocage. Vous posez dessus un journal, un magazine, un livre lourd et le déplacez de droite à gauche ou de haut en bas, pour lire, très facilement. Avec les feins bloqués, vous pouvez alors faire des mots croisés, remplir un chèque, écrire une lettre.

Enfin, si la lecture agrandie de magazines, romans, articles, vous fatigue au bouts de quelques minutes, vous lancez d'un simple geste du doigt, la **lecture vocale de votre texte**.

## La lecture vocale vraiment intuitive

**Pointez simplement à l'écran un mot et la lecture vocale commence instantanément.** Ensuite le texte lu défile à l'écran avec le grossissement, le contraste et la couleur, adaptés à votre vue.

La lecture, d'une colonne, par rapport au centre de l'écran ou de tout l'écran est bien évidemment possible en choisissant un de ces modes de reconnaissance du texte.

Mais "la lecture en continue" est la fonction du VEO VOX unique. Elle permet **le suivi automatique des déplacements du document**.

Ainsi, une fois la lecture vocale commencée, déplacez simplement le plateau de lecture à votre rythme pour faire apparaître la suite de votre article ou page. Le Veo Vox détecte alors le déplacement et continue la lecture vocale au fur et à mesure que du nouveau texte apparait.

## Sauvegarde des documents

L'image affichée à l'écran est facilement mémorisée dans la mémoire du VEO VOX par un simple appui sur une icône de l'écran. Les images sauvegardées peuvent alors être gérées directement via l'écran tactile et rappelées afin d'être visualisées, grossies, et même lues vocalement par l'OCR.

Si une clé USB est insérée dans le port prévu à l'arrière du VEO VOX, la sauvegarde s'effectue alors dessus en format JPG, PDF (image), et TXT.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Téléagrandisseur parlant VEO VOX ( démonstration)

## Les plus du VEO VOX

### L'image sans reflet

Un magazine au papier glacé ? une étiquette de soda? une jaquette de CD ?  
VEO VOX est idéal pour **lire tous vos documents, même s'ils sont brillants**. En effet l'image est sans reflet grâce à l'éclairage polarisé, breveté, révolutionnaire et unique.

### Ecran rotatif

Selon le document à consulter, l'écran se tourne en **mode paysage** (horizontal) , ou en **mode portrait** (vertical). Une colonne d'un journal s'affiche alors avantageusement dans l'écran tourné en mode portrait (dépend du grossissement).


### Complètement personnalisable

Choisissez à votre guise une voix féminine ou masculine, vitesse et intonation. Pour la partie téléagrandisseur, les couleurs, le contraste, la luminosité, le surlignage du texte et beaucoup d'autres paramètres sont accessibles. Tout est prévu pour qu'un malvoyant, atteint de DMLA ou autre maladie de la vue, adapte le VEO VOX au mieux de ses besoins de basse vision.

### Ecouteurs bluetooth

Des écouteurs bluetooth ou un casque sans fil peuvent être connectés au Véo Vox, laissant vos voisins dans le silence.

Le VEO VOX est le téléagrandisseur parlant par excellence pour tout personne malvoyante désireuse de lire intensément, tout type de document dans une rapidité et un confort appréciables au quotidien.

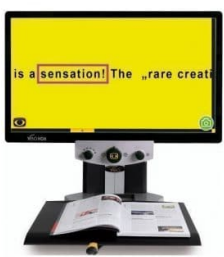

## CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉAGRANDISSEUR PARLANT VEO VOX

Ecran LED 24" ( 61 cm) tactile, orientable, ajustable en hauteur et rotatif, Full HD 1920 x



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

[01 69 19 14 60](tel:0169191460) - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Téléagrandisseur parlant VEO VOX ( démonstration)

1080.

- Mode télé agrandisseur
  - Grossissement de 1x à 100x, zoom optique de 18x, vision d'une page A4 en entier
  - Commandes des fonctions téléagrandisseur, simples avec 3 boutons en bas de l'écran
  - Sauvegarde des images dans la mémoire interne
  - Mode couleurs réelles et mode fonds colorés (Noir/Blanc, Blanc/Noir, Vert/Noir,Jaune/Bleu et Jaune/noir)
  - Autofocus permanent intelligent
  - Contraste/Luminosité ajustables
  - Ligne de guidage et fenêtrage
- Mode machine à lire
  - Commandes des fonctions OCR, vocales, grâce aux icônes tactiles affichés sur l'écran
  - Mode de reconnaissance: par colonne, tout l'écran, centré et en Lecture continue.
  - Fonction de pointer un mot à l'écran pour débiter la reconnaissance
- Eclairage à LED, breveté, atténuant visiblement les reflets sur les documents brillants.
- Bluetooth pour écouteurs
- Mémorisation automatique des derniers réglages
- Plateau de lecture avec freins et blocages en X et Y
- Poids : 17 kg – Dim. 55 x 60 x 59 cm
- Garantie : 2 ans

## LES POINTS FORTS DU VEO VOX

- **Une lecture instantanée**
- **Les 2 modes de lecture vocale :**
  - **lecture automatique intelligente qui suit vos déplacements du documents**
  - **lecture directe par sélection tactile du début de la partie à lire.**
- La visualisation d'une page A4 en entier (grossissement 1), jusqu'à un grossissement de 100
- Un grand écran tactile de 24"
- Une synthèse vocale de qualité à la voix agréable, multilingue
- Un menu de paramétrage complet (voix, couleur, fonctionnalités, etc.)
- L'éclairage à LED procurant une image sans reflet même sur documents brillant
- Compatible avec les écouteurs et casques Bluetooth
- Le plateau de lecture avec freins pour faciliter tant la lecture que l'écriture



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Téléagrandisseur parlant VEO VOX ( démonstration)

## LES VIDÉOS DU VEO VOX

Des vidéos sur le VEO Vox sont disponibles sur notre chaine Youtube

L'écran tactile du téléagrandisseur parlant VEO VOX peut nécessiter une re-calibration afin d'être toujours très précis et réactif. Pour cela, la vidéo ci-dessous explique la méthode simple recommandée par le fabricant.

### Calibration de l'écran tactile



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)