

# MINIVISION 2 +



TÉLÉPHONE VOCALISÉ POUR SÉNIORS,  
MALVOYANTS ET AVEUGLES

**Le MINIVISION 2 + est un téléphone portable adapté pour la basse vision : clavier à grosses touches avec repères tactiles, écran gros caractères, synthèse vocale et dictée vocale.**

- Complet et simple d'utilisation
- Vocalisé, gros caractères, dictée vocale, bouton SOS, etc.
- Excellente prise en main et touches avec repères tactiles.
- Mise en charge très facile en posant le MiniVision 2 + sur son Socle de charge
- Téléphone débloqué tout opérateur.



Le MINIVISION 2 + est un téléphone spécialement conçu pour les seniors déficients visuels, malvoyants et aveugles ou peu technophiles.

Ainsi, il est **portable**, avec des **grandes touches** bien espacées lisibles avec **repères tactiles**, un **affichage en gros caractères**, une **synthèse vocale** et des commandes vocales. Ce téléphone comprend l'essentiel des fonctions courantes dans un téléphone adapté simple à utiliser.

Il est l'évolution du modèle MiniVision, avec de nombreuses améliorations et



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# MINIVISION 2 +

compléments.

## Les 2 modes d'interaction avec le MINIVISION 2

L'utilisateur accède aux fonctions du téléphone soit par le clavier, soit par la commande vocale.

De même la saisie de texte dans un SMS par exemple, peut se faire avec le clavier ou en dictant simplement le texte.

### Le clavier est vraiment ergonomique et intuitif

- 5 touches bien distinctes composent le pavé de navigation :
  - Le bouton **OK central**, carré et à la surface granitée permet de valider un élément par un appui court et lance les commandes vocales par un appui long.
  - Les **touches de direction Haut, Bas, Droite, Gauche** sont toutes physiquement séparées pour un meilleur repérage. De plus, elles comportent chacune une ligne en relief à leur extrémité pour mieux guider l'utilisateur lors de l'appui.
- A droite de ce pavé de navigation, la touche **Retour à l'écran précédent** et en dessous **la touche Raccrocher** sont espacées et agrandies.
- A gauche du pavé, la touche **Menu et la touche Décrocher** sont également espacées et agrandies.
- Les **touches Décrocher et Raccrocher** comportent 3 picots en relief pour faciliter leur repérage.

### L'interface vocale

Le MINIVISION 2 + reconnaît la voix de l'utilisateur après un simple appui long sur la touche OK.

Les **commandes vocales** permettent de lancer une fonction comme un appel ou la création d'un SMS. Ainsi, le MINIVISION 2 + est un téléphone pour aveugles autant qu'un téléphone pour malvoyants.

- La **dictée vocale** est quand elle est utilisée pour saisir à la voix, du texte dans un message SMS, un numéro de téléphone, etc.

### L'accessibilité du Minivision 2 +

- La vocalisation de tous les textes s'affichant à l'écran utilise la **synthèse vocale Premium**, intégrée.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# MINIVISION 2 +


- De nombreux **raccourcis claviers** donnent accès direct à la numérotation abrégée, au statut du téléphone, au réglage de la synthèse vocale, etc.
- L'**écran affiche les textes grossis** avec un contraste et une vitesse de défilement personnalisables,
- Enfin, le menu donne accès à de nombreux paramètres d'accessibilité.

## Fonctionnalités du MiniVision

- **Communication** : Téléphone, Messages (SMS et MMS), Contacts
- Vie Pratique : **Appareil photo**, Galerie photos, Agenda, Alarme, Calculatrice, Notes, Météo, **Lampe torche**
- Aide à la vie quotidienne : **Détecteur de couleurs**, détecteur de **lumière** et détecteur de **billets**
- Aide à la sécurité : Appels et SMS d'urgence via le **bouton SOS**, fonction de géolocalisation « Où suis-je »
- Divertissement : Radio FM

## Recharge facilitée

Le socle de recharge permet de très facilement poser le MINIVISION 2 + en vue de sa recharge. Cette fonctionnalité est fortement appréciée des séniors et personnes malvoyantes ou aveugles ayant des difficultés avec la motricité fine. L'autre possibilité classique de charge est de brancher le câble USB / Micro USB au téléphone.

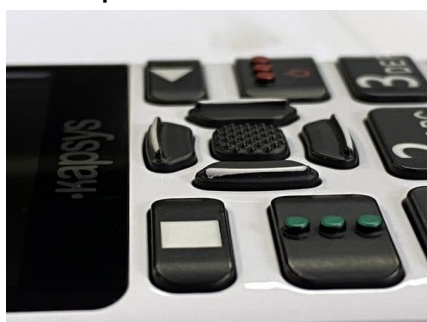

# MINIVISION 2 +

## DESIGN

- Dimensions : 125 x 60 x 13 mm
- Poids : 103g
- Ecran : 2,31" / QVGA

## MATERIEL

- Processeur : Quad Core 1.5 GHz
- Mémoire :
  - interne RAM 1 Go / Flash 8 GB
  - Mémoire externe par carte SD, jusqu'à 32GB
- Connectivité cellulaire : 4G, 3G et 2G
- Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth 4.2
- Format de carte SIM : nano SIM
- Connecteurs : jack audio 3.5 mm, micro USB
- Batterie: 1600mAh Li-ION
- Autonomie : 200h en veille et 7 h en communication
- SAR : tête 0,563 W/Kg, et Corps 1,577 W/kg

## APPAREIL PHOTO

- Résolution: 2 Megapixels
- Flash LED

## MUSIQUE ET AUDIO

- Radio FM
- Sonneries et Vibrations

## CONTENU DU PACK

- MiniVision 2 + et sa coque de protection
- Tour de cou
- Câble micro USB et écouteurs avec micro
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide

Par rapport au MiniVision Lite, le MiniVision 2 propose en plus :

- Un clavier avec des touches plus grosse et plus distinctes
- Un bouton SOS dédié au dos du téléphone



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# MINIVISION 2 +

- Un détecteur de lumière, de couleurs et de billets
- Un socle de recharge
- Une coque silicone de protection
- La fonction où suis-je
- La prise de notes, la météo et un Dictaphone



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)