

# E-bot PRO



Guide d'utilisation

Résumé des commandes




4 rue Leon Blum, ZAE les Glaises  
91120 Palaiseau

01 69 19 14 60  
[info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr) [www.visiole.fr](http://www.visiole.fr)

# Mise en Oeuvre de E-Bot adv



## Pour DEPLIER

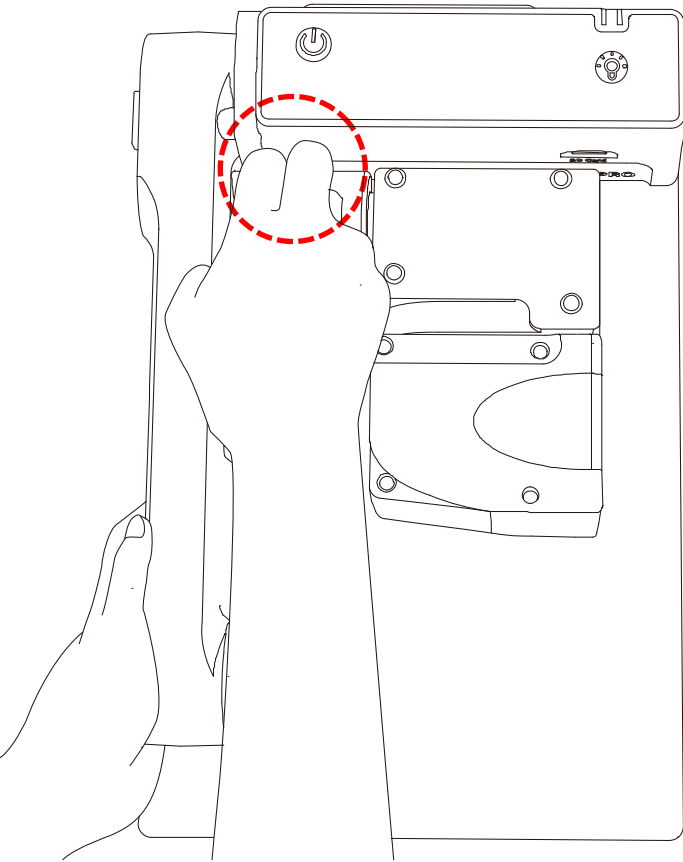

**1- Soulever le bras de la camera en plaçant os doigts dans l'emplacement prévu**

**2- APPUYEZ sur le bouton de verrouillage (bleu)**


**3- Soulevez le bras en maintenant le bouton appuyé**

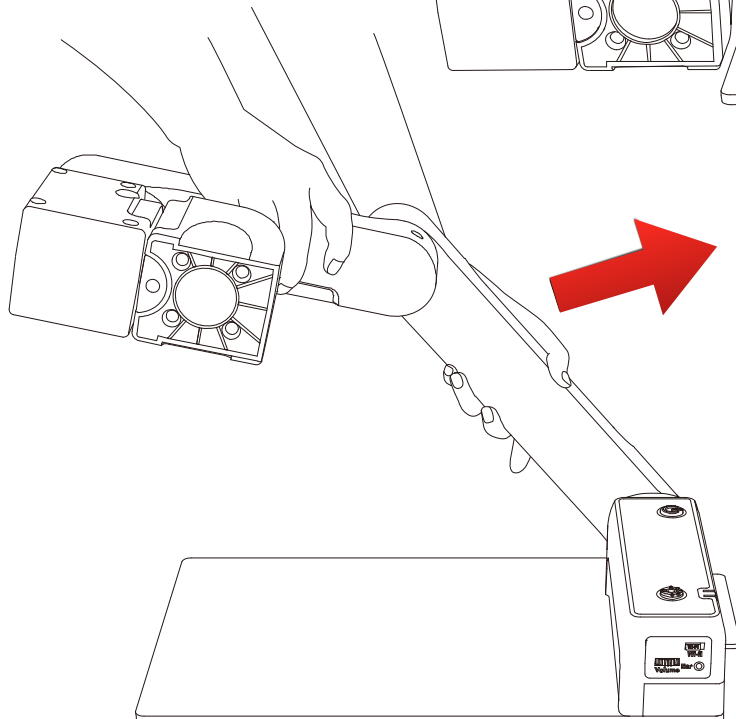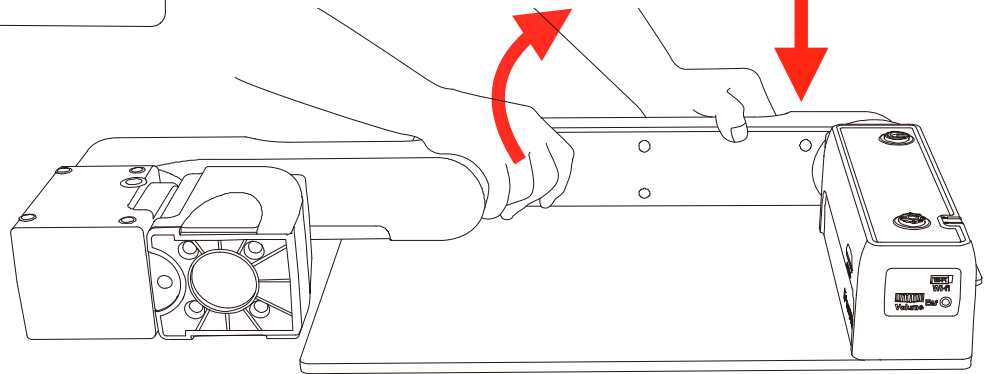


**4- Dépliez complètement le bras jusqu'au verrouillage**

**Pour REPLIER**


**1- Appuyez courbement sur le bouton Marche / Arrêt**

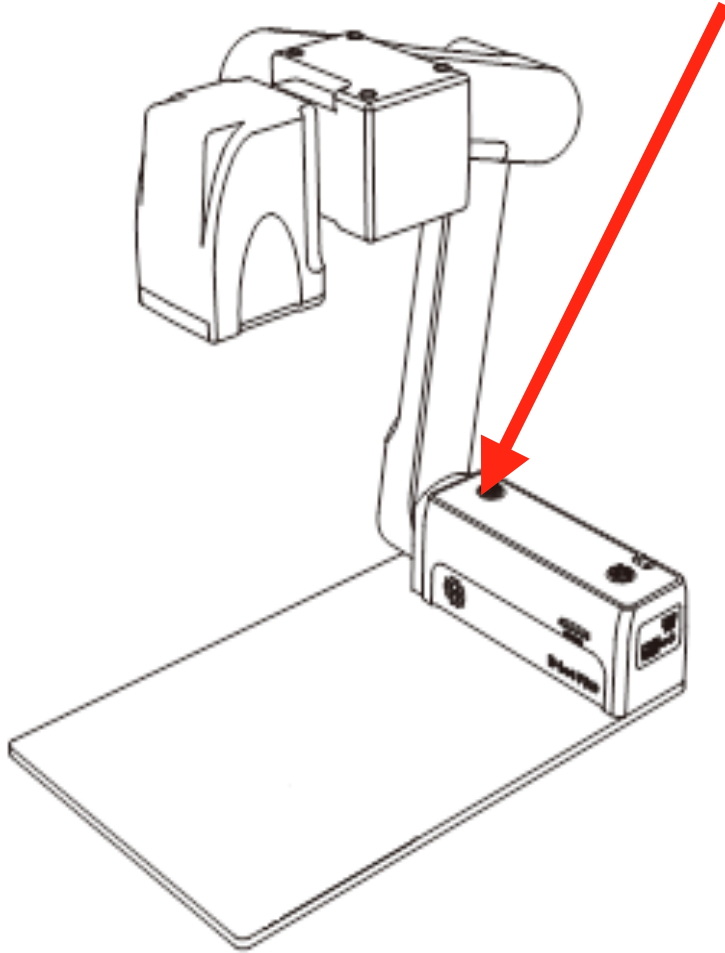


**La caméra bouge alors jusqu'à sa position de repos.**

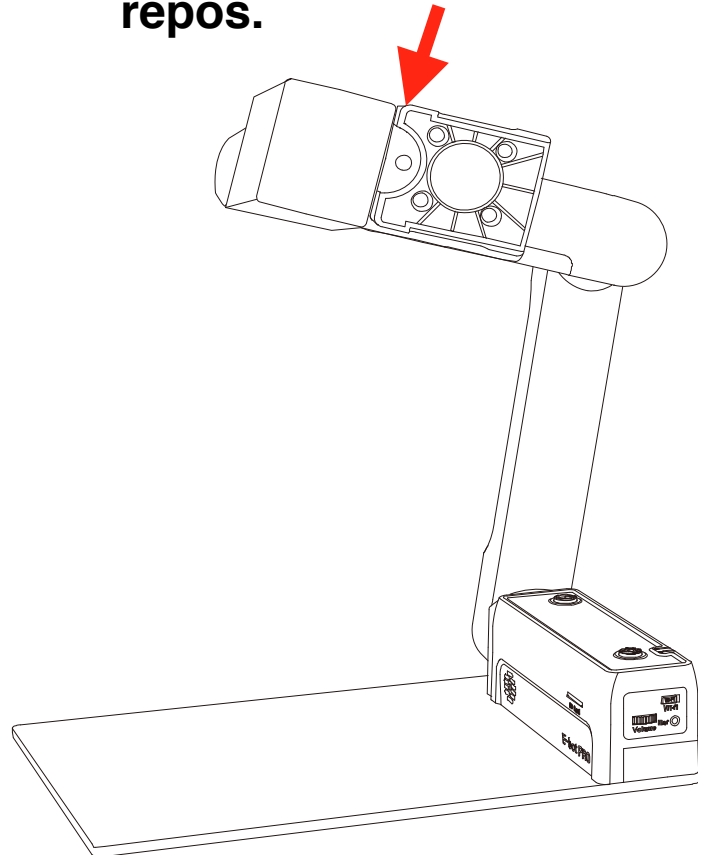


**2- Appuyez sur le bouton de verrouillage et amenez doucement le bras sur la table**

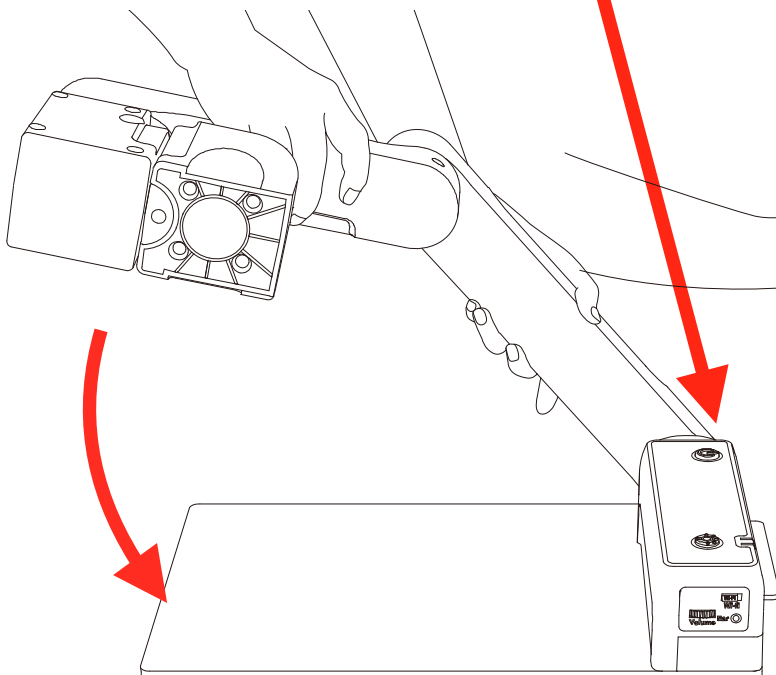


**3- Repliez le bras de la caméra**

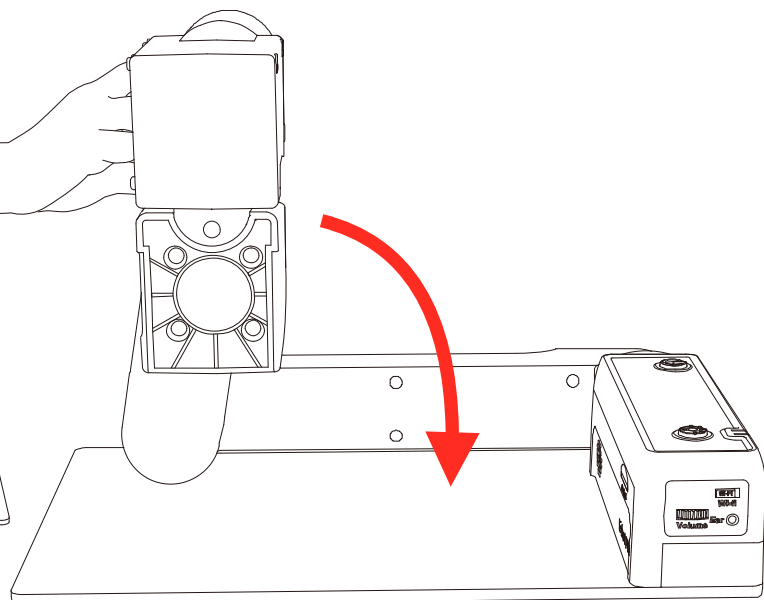


# La Batterie

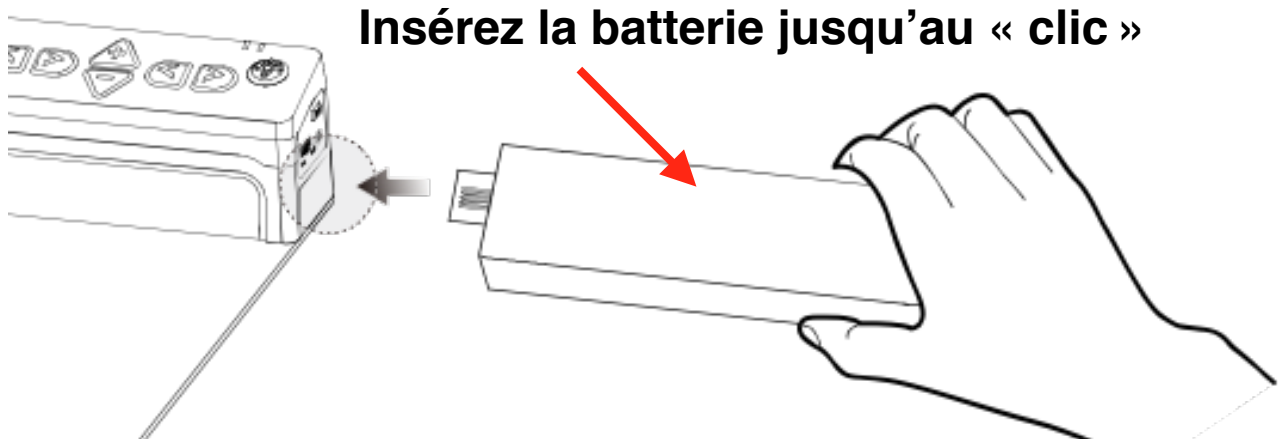

**Pour retirer la batterie, soulever le loquet de verrouillage**

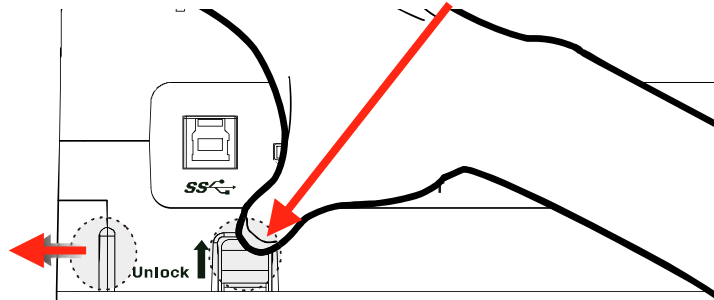


## Charge

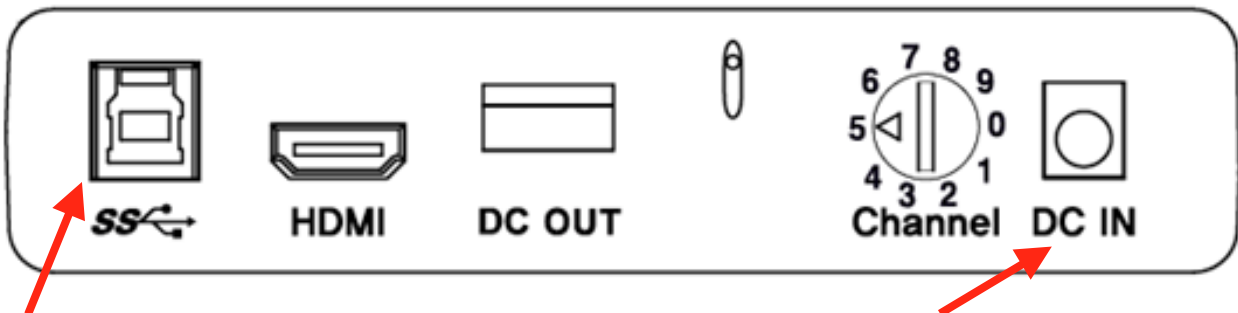

**USB : Charge si E-Bot éteint en plusieurs heures**

**Prise de charge : max 5 h**

**Voyant de charge :**  
- Rouge : en charge  
- Vert : chargé (lorsque E-bot allumé, sinon éteint)

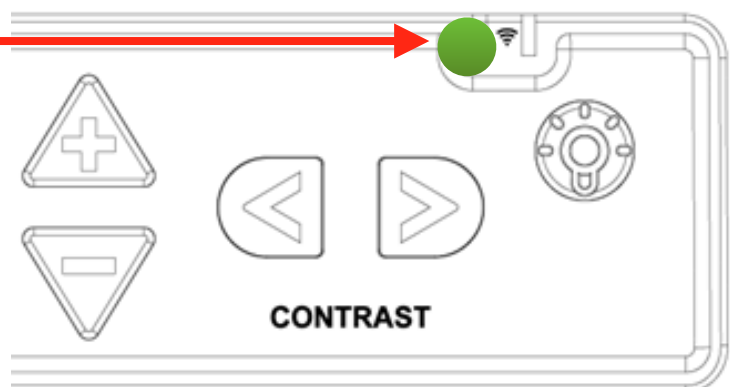


# Multi-Connectivité

## Téléviseur et Ecran informatique

- HDMI
- DVI (adaptateur HDMI / DVI livré)

## Moniteur portable:

- HDMI et alimentation par le port USB DC OUT

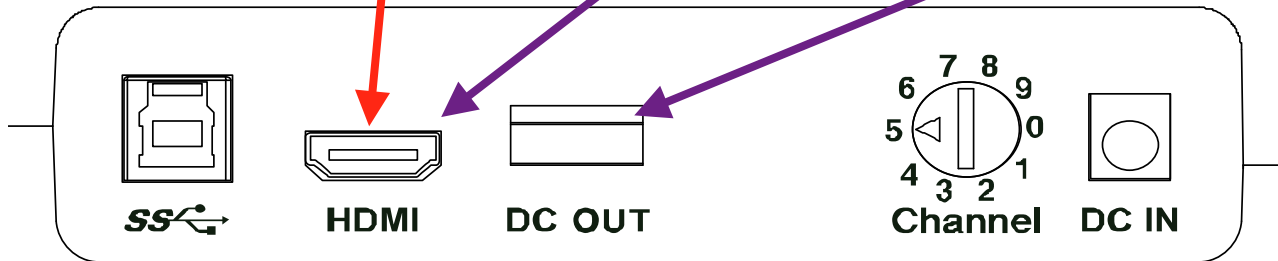


## PC ou MAC:

- Coté ordinateur
- WIFI



Allumer le WIFI

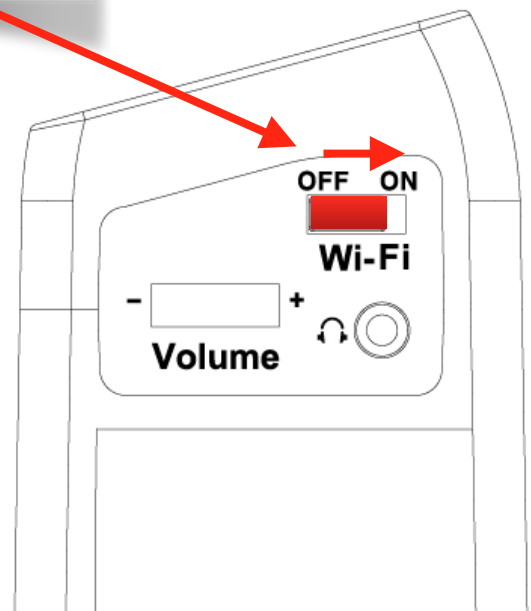

## Coté PC ou MAC ou Tablette

Choisissez le réseau


WIFI "E-bot-00xxx "

Mot de passe 00000000

(modifiable dans le menu du E-Bot)

Note : l'utilisation d'internet en Wifi sur le PC ne peut pas avoir lieu en même temps que l'utilisation du E-Bot

Voyant bleu = OK

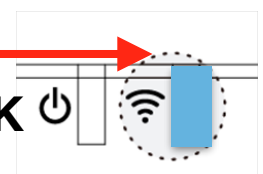

# Panneau de Contrôle

## Marche / Arrêt


Appui bref : Marche

Appui bref : Mise en veille


Appui plus de 3 s : Arrêt total

Note: depuis la veille, le temps de mise en marche est court.

Note: le E-Bot s'arrête automatiquement lors du pliage

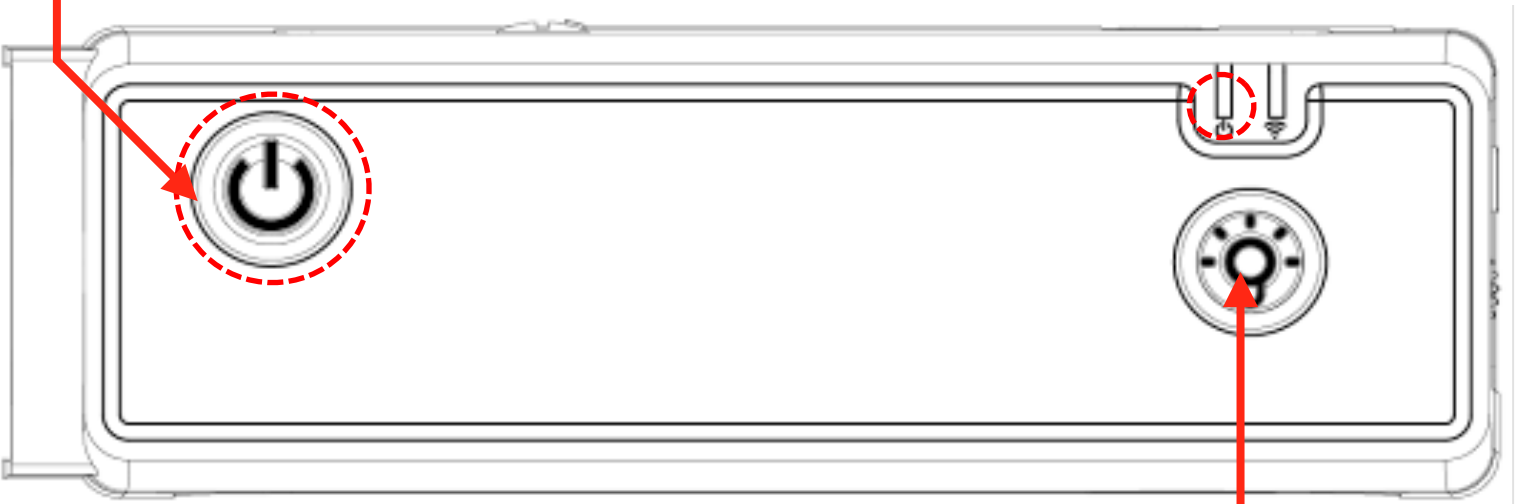

Eclairage

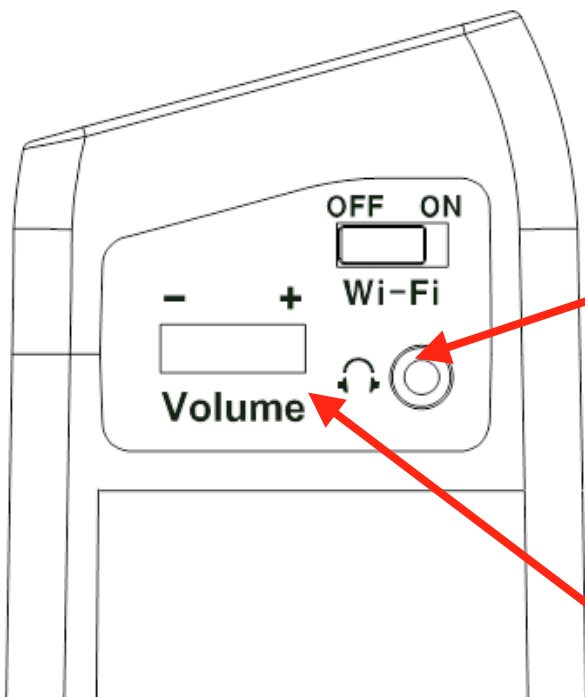



## Audio

Prise pour casque ou écouteurs.


Note : les écouteurs avec micro ne sont pas acceptés.

Réglage du volume

# Télécommande

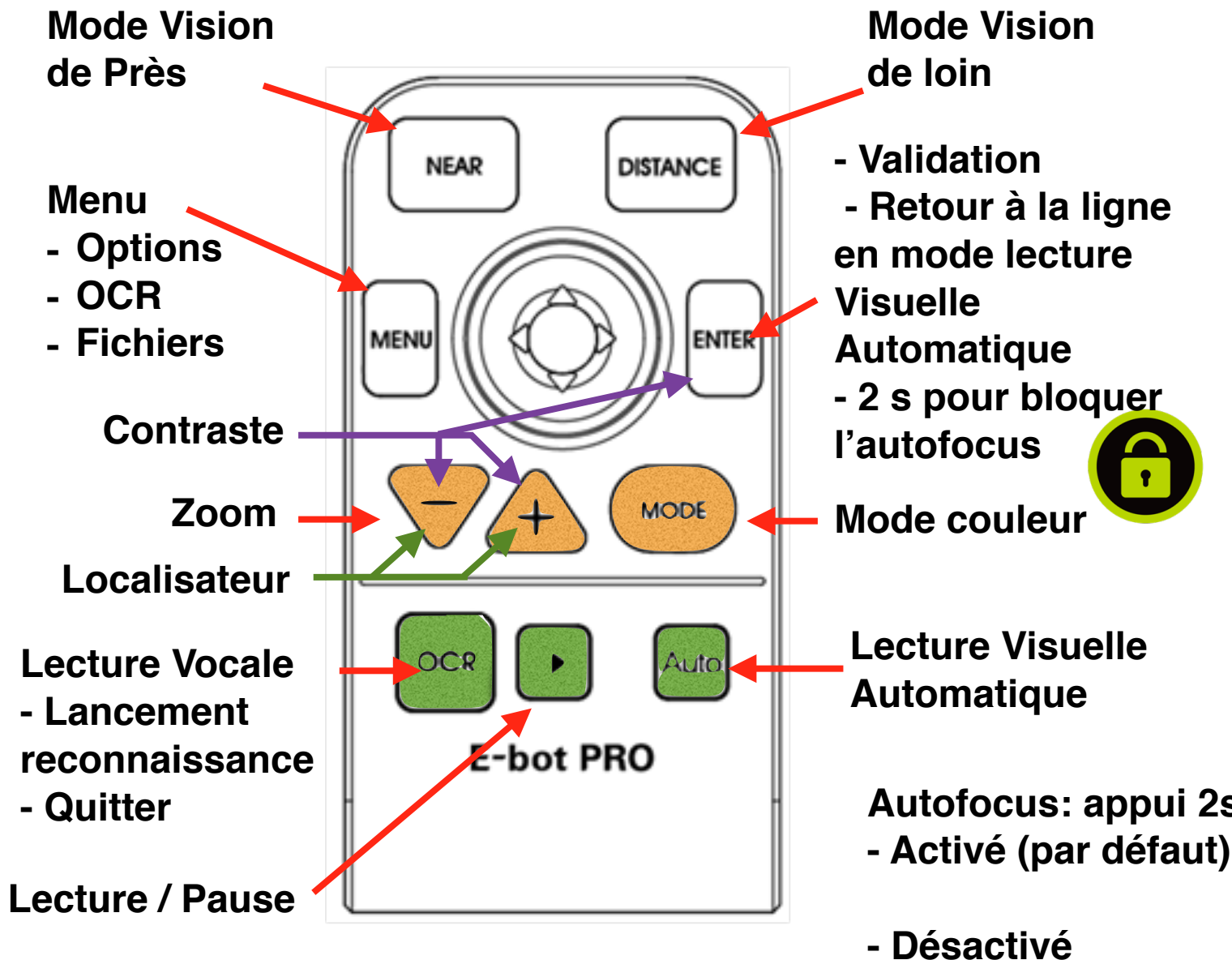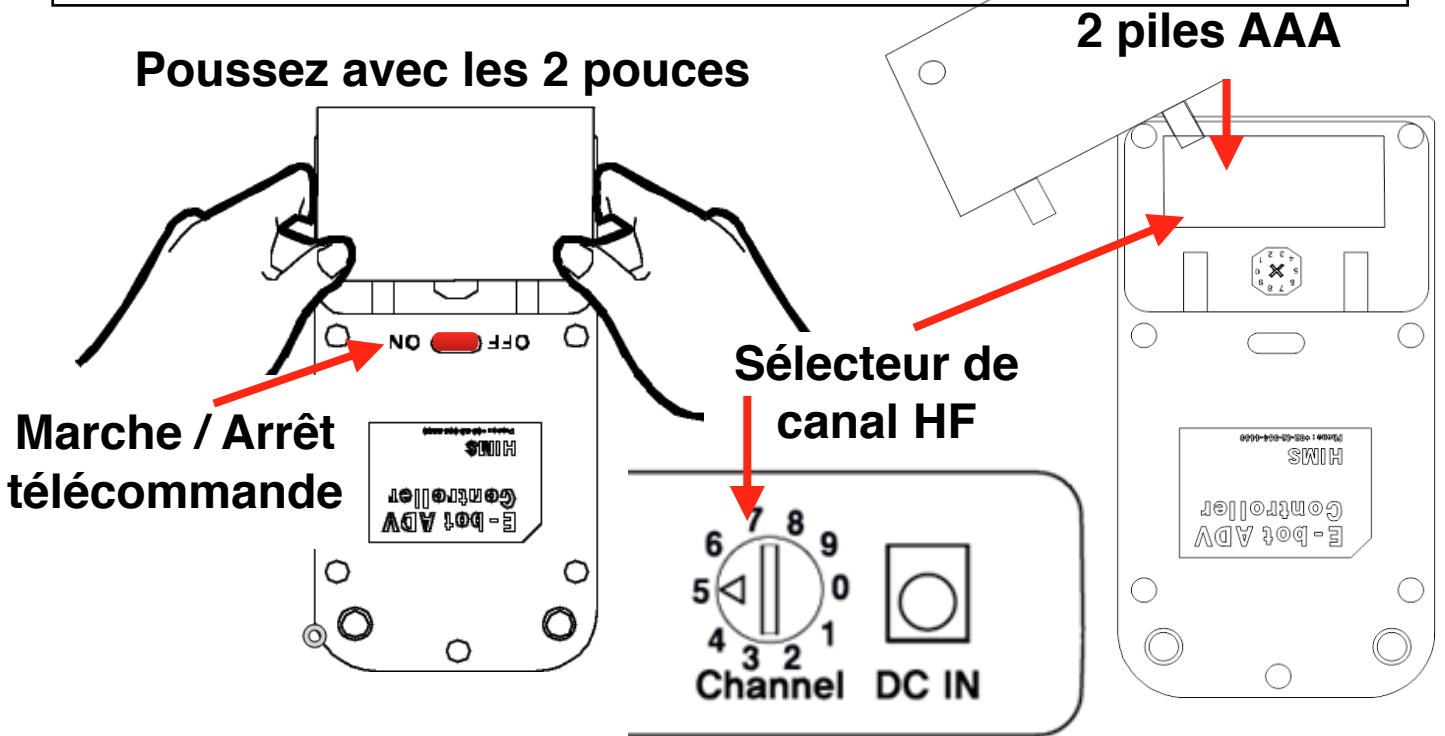

# Vision de près / Vision de loin

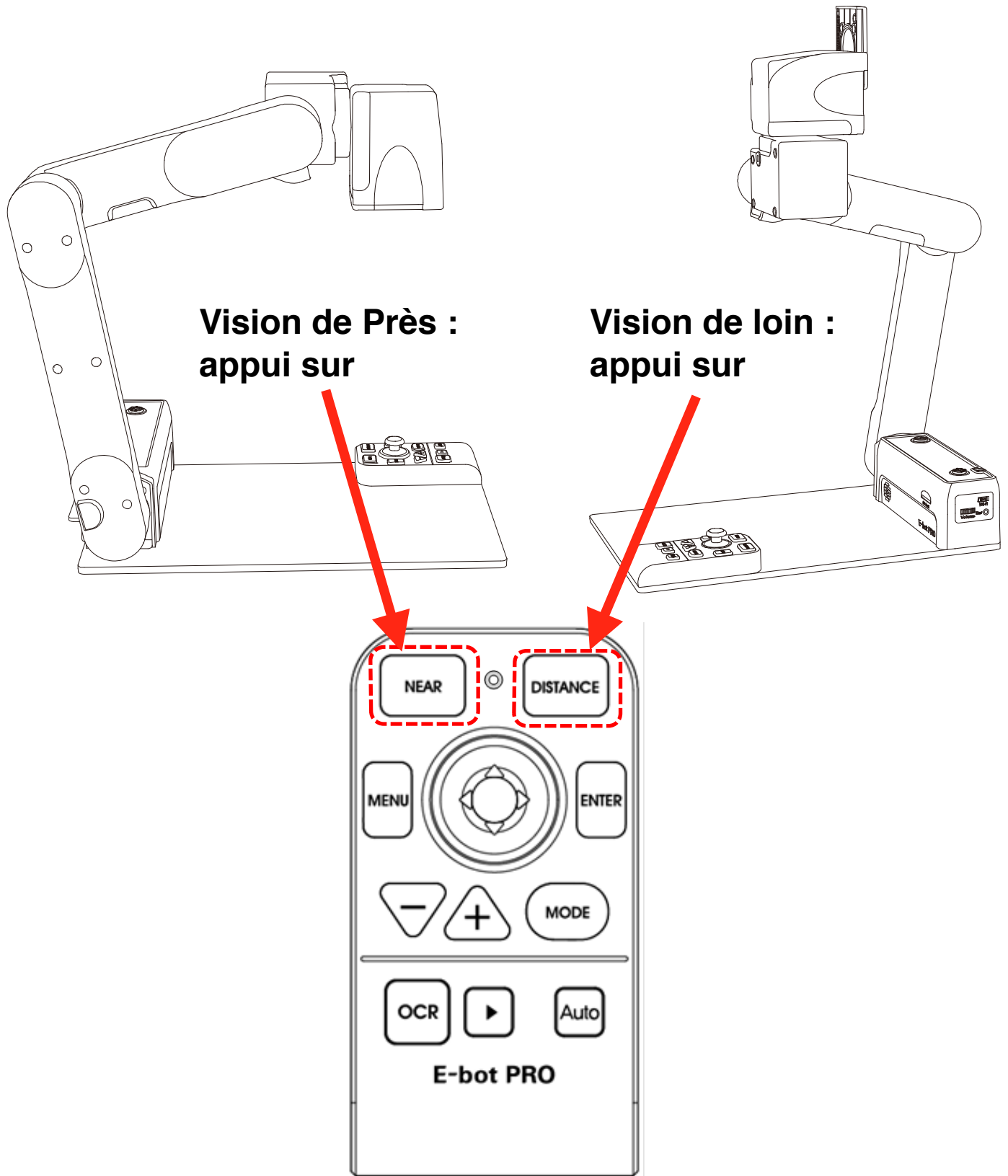

**Note : La caméra se positionne sur la dernière position utilisée et les paramètres de zoom, de mode couleur, etc sont automatiquement activés**




# Sauvegarde image et texte

1- Insérez une carte mémoire SD



2- Un appui de 2 s, déclenche la sauvegarde de :

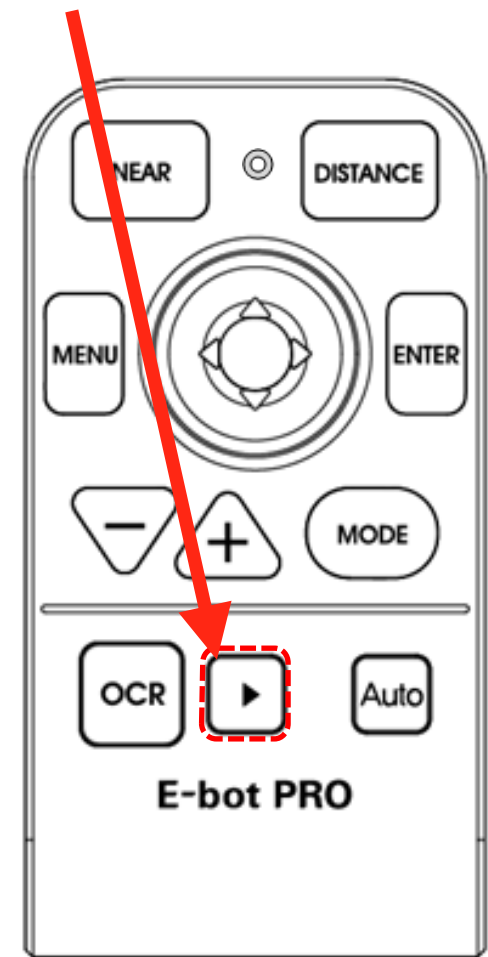


- En mode vidéo-agrandisseur : l'image visible à l'écran
- En mode machine à lire / OCR: L'image et le texte du document déjà « scanné ».


# Menu

Le menu est accessible à partir de :

## Télécommande

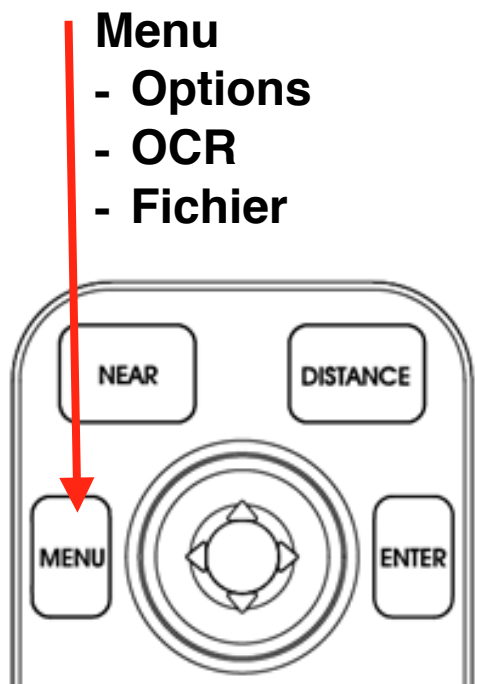


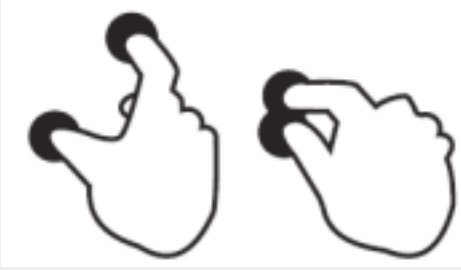
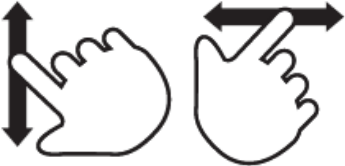
## Tablette

Menu	Ouvrir	 Glisser un doigt à partir du bord gauche
	Fermer	 Glisser un doigt à partir du bord droit












## PC ou MAC

Menu	Ouvrir	Ctrl +M	Click droit
	fermer menu	Echap ou Retour arrière	Click gauche

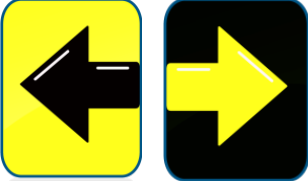





# Utilisation sur Tablette

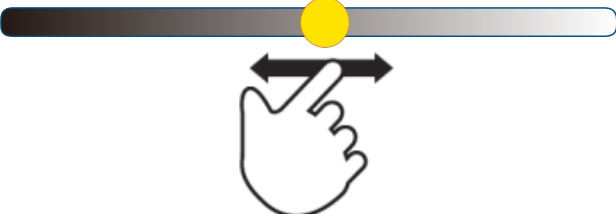Fonctions	Gestes pour Tablette
Augmenter le grossissement	 <p data-bbox="1002 622 1326 667">Ecarter deux doigts</p>
Réduire le grossissement	 <p data-bbox="981 1041 1348 1086">Resserrer deux doigts</p>
Déplacer le texte à l'écran = faire bouger la caméra	 <p data-bbox="879 1368 1453 1458">Déplacer le doigt dans la direction désirée</p>

# Utilisation sur Tablette (suite)

<p><b>Menu Fonction</b></p>	<p>Faire apparaître</p>	 <p>Glisser un doigt à partir du bord droit</p>	
 <p>Un doigt sur l'icône</p>	<p>Mode couleur</p>		
	<p>Démarrer / arrêter la lecture vocale</p>		
	<p>Autofocus bloqué / marche</p>		
	<p>Mode vision de près / loin</p>		
<p>Contraste</p>	 <p>Faire glisser un doigt</p>		
<p>Quitter</p>	 <p>Glisser un doigt à partir du bord gauche</p>		

# Utilisation sur Tablette (suite)
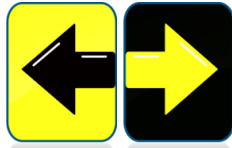
<b>Lecture vocale</b>	Play/Pause	 Taper un doigt
	Se déplacer d'une phrase	 Glisser un doigt à droite ou à gauche
	Se déplacer d'un paragraphe	 Glisser un doigt vers le haut ou le bas
	Mode lecture vocale <-> mode vidéo-agrandisseur	 Double tape de 2 doigts
	Choix mode couleur	
	Contraste	 Faire glisser un doigt

# Utilisation sur PC et MAC

	Fonction	PC	
		Clavier	Souris
	Augmenter le grossissement	+	molette vers le haut
	Diminuer le grossissement	-	molette vers le bas
	Déplacer l'image / bouger la caméra	Flèches	click gauche et déplacement souris
	Retour à la ligne automatique	Entrée / Validation	
	Localisateur	Ctrl + F	-
	Mode couleur suivant	M	Click gauche
	Mode couleur précédent	Maj + M	-
	Changement couleur rapide	N	-
	Augmenter contraste	C	-
	Diminuer contraste	Maj + C	-
	Autofocus	Ctrl + I	-
	Mode vision de près	Ctrl + N	
	Déplacement à la position préférée (mode vision de près)	Ctrl + N	
	Mode vision de loin	Ctrl + D	
	Déplacement à la position préférée (mode vision de loin)	Ctrl + D	
Lecture visuelle automatique	Marche / Arrêt	Ctrl + A	
	Pause / Lecture	Espace	
Vitesse Voix	Plus rapide	[	
	Plus lent	]	

	Fonction	PC	
		Clavier	Souris
Lecture vocale ( OCR )	lancer	O	Click molette
	Lecture / Pause	Espace	-
	Phrase suivante	Flèche droite	-
	Phrase précédente	Flèche gauche	-
	Paragraphe suivant	Flèche basse	-
	Paragraphe précédent	Flèche haute	-
	Quitter	Echap	-
	Ouvrir menu	(en mode OCR) Ctrl+M	Click droit
	Mode lecture vocale ↔ Mode vidéo agrandisseur	Ctrl+P	-
Menu	Ouvrir	Ctrl +M	Click droit
	Déplacement entre tab	Flèche Droite ou gauche	Click gauche
	Déplacement entre item	Flèche haute ou basse	
	Choisir ; Valider	Validation ou Entrée	
	Annuler ; fermer menu	Echap ou Retour arrière	Click gauche
Quitter Programme		Alt + F4	

# Configuration recommandée

**Ordinateur : Port USB 3.0**

**PC : CPU : i5 ; RAM : 4 Go**

**Mémoire graphique : 1Go**

**Windows : XP, Vista, 7 ou 8**

**PC avec port USB 2.0 : image affichée en faible résolution**

**Mac OS : OS X Lion (10.7) ou supérieur**

**MAC avec port USB 2.0 : non supportés**

**Tablettes avec Windows RT : non supportées.**

